

OVERLINE

ITALIA



Infinity

Tecnologia Made In Italy 

TOTAL BODY SCULPT

SINERGIA PERFETTA PER UN CORPO DA FAVOLA



-  ENDOMASSAGGIO
-  ELETTROLIPOLISI
-  ULTRASUONI 1MHz
-  ELETTROPORAZIONE
-  RADIO FREQUENZA
-  CROMO FREQUENZA
-  LLLT
-  ONDA BATTENTE
-  VACUUM



Sinergia ultra rimodellante. Cellulite* Adipe & Atonia

Un'apparecchiatura all'avanguardia che si avvale di un mix di tecnologie efficaci nello snellimento della silhouette, che, grazie a speciali manipoli possono essere utilizzate in modo sinergico oppure singolarmente.

Consente azioni riducenti, elasticizzanti, tonificanti, modellanti e drenanti grazie all'azione stimolante lipolitica del Low Level Laser (LLLT) che agisce in modo diretto, mirato e non invasivo sulla membrana cellulare, favorendo lo scambio e l'eliminazione del grasso nelle cellule adipose.

L'apparecchiatura è dotata anche della tecnologia Endomassaggio per drenare, gli Ultrasuoni 1MHz per un'azione slim, l'Elettrolipolisi per tonificare, la Radio Frequenza per un'attività stimolante del Collagene, l'Elettroporazione per un'azione transdermica, Cromo Frequenza per un'attività riequilibrante. Non dimentichiamoci che, essendo una tecnologia completa, si avvale di manipoli speciali anche per il viso, per offrire una risposta total look a qualsiasi cliente.

- ★ SINERGIA RIVOLUZIONARIA
- ★ RIDEFINIZIONE LASER
- ★ MANIPOLI MULTIFUNZIONE
- ★ ERGONOMICITÀ
- ★ RIDEFINIZIONE SILHOUETTE
- ★ MIX RADIO FREQUENZA SPECIFICI
- ★ VEICOLAZIONE PRINCIPI ATTIVI
- ★ AZIONE TONIFICANTE
- ★ OPZIONE RELAX
- ★ FUNZIONE INTENSIVA
- ★ AZIONE TRANSDERMICA

**inestetismi causati dalla cellulite.*



PROTOCOLLI PERSONALIZZATI

Grazie a studi approfonditi per la realizzazione di questa sofisticata tecnologia, è stato realizzato un software di alto livello che mette in condizione l'utente di eseguire qualsiasi tipo di trattamento sul proprio cliente.

Si inizia con la valutazione dell'Indice di Massa Corporea (IMC), dopodiché si procede con l'esecuzione di un test basato su semplicissime domande, questo ci aiuta a capire la morfologia del cliente da trattare. I somatotipi, studiati fin dall'antichità, non sono altro che le differenti tipologie di fisico. Nessuno di noi è identico all'altro e nessuno ha le stesse caratteristiche assolute riferite ad uno dei tre, molto spesso ogni individuo corrisponde ad uno o più somatotipi, grazie a questo software e al suo algoritmo siamo in grado di stabilire la dominanza e procedere con il trattamento più accurato.

Ogni somatotipo ha determinate caratteristiche: ad esempio l'inetetismo causato dalla cellulite, le imperfezioni date da accumuli adiposi o addirittura un insieme delle stesse. Grazie a questa tecnologia siamo in grado di determinare le imperfezioni del corpo specifiche e a trattarle con il protocollo adeguato. Il software è inoltre in grado di stabilire il numero di sedute necessarie per migliorare la situazione. Questo non è pensato per sminuire la professionalità dell'Operatore Estetico, al contrario vogliamo coadiuvarla nel raggiungimento di risultati rassicuranti. Se vi volete mettere in gioco senza aiuti potete sempre scegliere il trattamento libero.

Nessuno vi ha mai offerto più scelta!





SYNERGY ENDO
endomassaggio - LLLT
cromo frequenza - radio frequenza




RF BIPOLARE

TOTAL BO

TECHNO WAVE
massaggio battente - radio frequenza
LLLT - vacuum



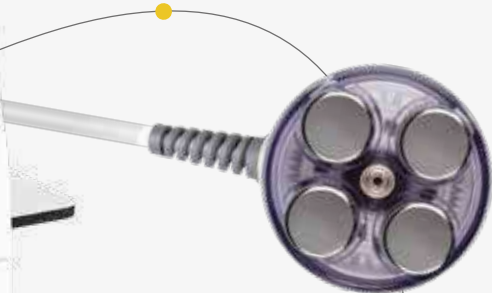


SYNERGY ULTRA
*ultrasuoni 1MHz- elettrolipolisi
cromofrequenza - radio frequenza
elettroporazione*

RF MULTIPOLARE

SYNERGY SCULPT



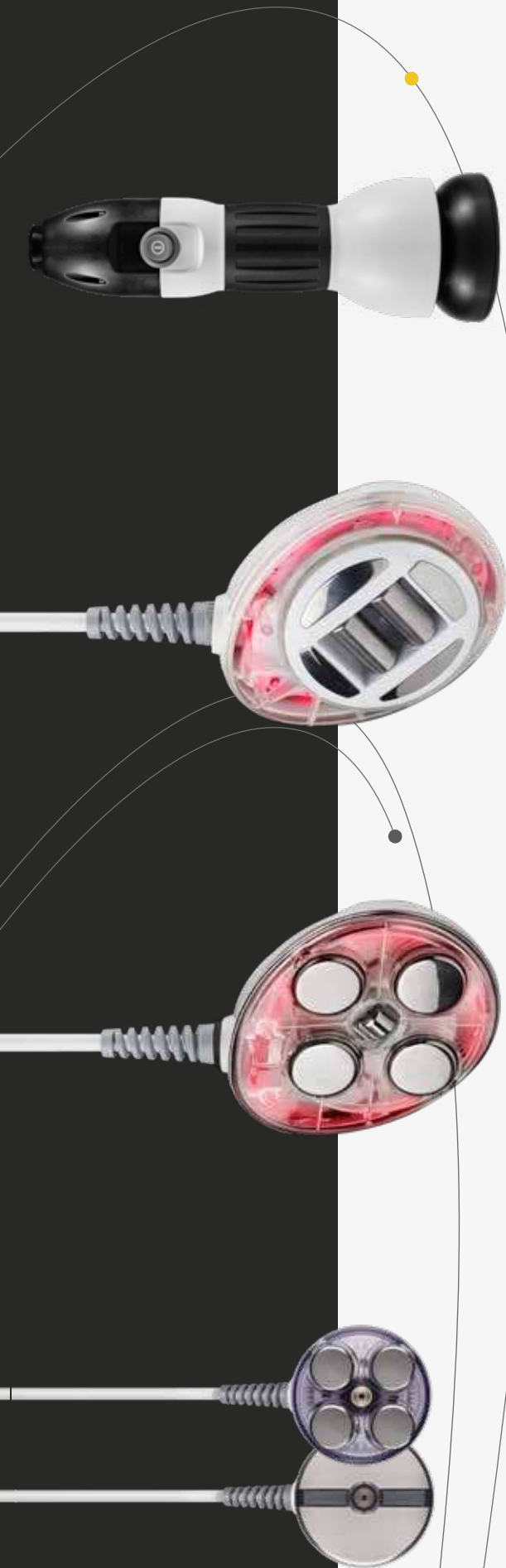

TECHNO WAVE

Overline ha coniugato grazie ai suoi laboratori di ricerca, più energie in un unico movimento. Il manipolo sinergico, dotato di quattro azioni specifiche che si sviluppano all'unisono è in grado di raggiungere **risultati concreti e visibili fin dalla prima seduta.**



SYNERGY ENDO

Grazie agli studi effettuati dal laboratorio di ricerca e sviluppo, Overline ha messo a punto più trattamenti in un'unica azione. Il manipolo sinergico, dotato di quattro azioni specifiche che si sviluppano all'unisono è in grado di raggiungere **risultati concreti e visibili fin dalla prima seduta.**




SYNERGY ULTRA

Overline ha generato la possibilità di effettuare più trattamenti in un unico movimento grazie alle tecnologie presenti nel manipolo, più trattamenti in un unico movimento. Il manipolo sinergico, dotato di cinque azioni specifiche che si sviluppano contemporaneamente è in grado di raggiungere **risultati decisamente importanti sin dalle prime sedute.**




MANUAL RF

Overline per un lavoro più localizzato in aree particolarmente difficili da raggiungere ha pensato di inserire due manipoli, dalle dimensioni leggermente ridotte per poter agevolare un lavoro più specifico e dedicato

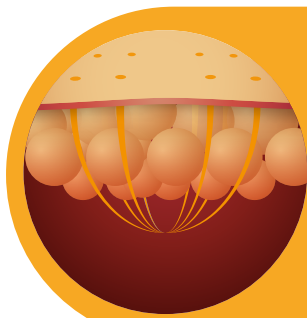


ELETTROLIPOLISI

L'elettrolipolisi è un trattamento presente tra le diverse opzioni di questa tecnologia. L'obiettivo di questa energia consiste nel ridefinire i noiosi inestetismi causati dagli accumuli adiposi senza alcun sforzo e senza generare effetti indesiderati.

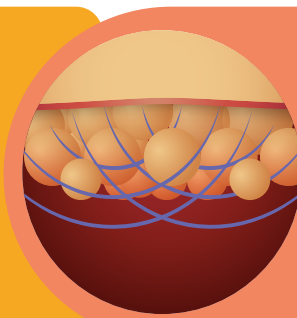

ULTRASUONI

Gli ultrasuoni sono onde che si propagano ad una certa velocità in base alla densità del tessuto. Normalmente impiegati per i comuni inestetismi causati dalla cellulite e dagli accumuli adiposi. Importante ricordare minore la potenza maggiore la penetrazione.

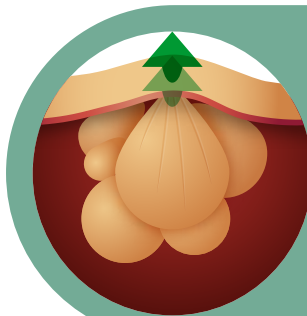


ENDOMASSAGGIO

Specifici applicatori permettono di effettuare in simultanea ad altre energie o singolarmente trattamenti di scollamento, drenaggio e massaggio ritmico, questa azione risulta essere indicata per gli inestetismi causati dalla cellulite.




VACUUM

Il massaggio vacuum con altre energie, fornisce un potente drenaggio linfatico per liberare il corpo, questo migliora anche il connettivo che può informare la struttura della pelle, facendola sembrare rimodellata.

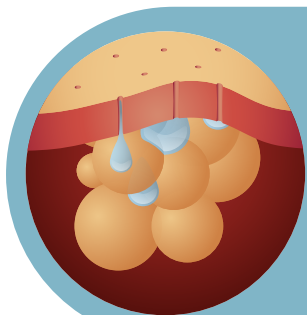


ELETTROPORAZIONE

L'Elettroporazione è un trattamento che favorisce la penetrazione e potenzia la veicolazione dei dermocosmetici, negli strati profondi del derma, permettendogli di agire in un modo diretto e immediato.

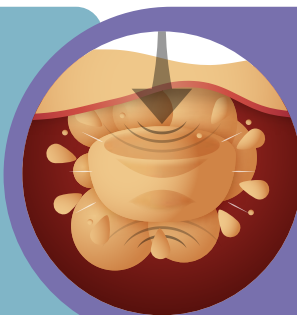


ONDA BATTENTE

Forte ondata di pressione in qualsiasi mezzo elastico come aria, acqua o una sostanza solida. Grazie a questa capacità è in grado di agire solo ed esclusivamente sugli adipociti, rimodellando gli accumuli adiposi e l'inestetismo della cellulite.

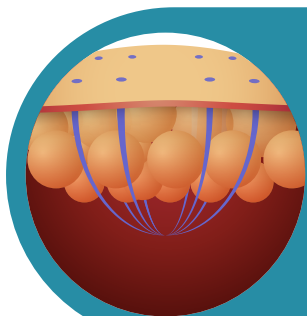

RADIO FREQUENZA

I trattamenti con RF sono usati come metodo per fornire calore ai tessuti più profondi grazie all'azione endogena della RF, con l'obiettivo di aumentare la produzione di collagene, stimolare la circolazione e influisce sul rilascio dei depositi di adipe dai tessuti.

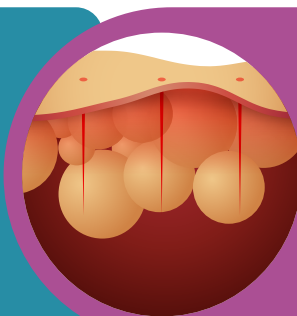

LLL

(Trattamento laser a bassi livelli) I suoi effetti sono quelli che, generando fotostimolazione, agiscono sulla tonificazione e rassodamento, riduce lo stress ossidativo e migliora il metabolismo cellulare e riduce l'infiammazione.

REVOLUTIONARY HANDPIECES

TECHNO WAVE

Questo straordinario manipolo multifunzione racchiude diverse energie al suo interno. Si tratta di un manipolo molto sofisticato che vi permetterà di raggiungere risultati mai visti sulle vostre clienti che hanno qualche inestetismo di troppo.


Nelle foto si può notare come si può lavorare su alcune aree specifiche, si può notare. I movimenti sono rappresentati da una griglia in salita con cerchi e in chiusura orizzontale da linee, semplici ma efficaci, vedremo il corpo modellarsi e adattarsi sotto l'azione di **TechnoWave**. La sinergia straordinaria ci permette di lavorare in zone come la gamba nella sua interezza fino alla cavaglia. Possiamo lavorare i lati dell'addome per creare tensione e sentirsi meglio. Possiamo trattare anche le spalle per un'azione rilassante. L'obiettivo che abbiamo definito con questa tecnologia è sconfiggere gli inestetismi causati dalla cellulite e dagli accumoli adiposi che affliggono così tante persone.






LA SINERGIA

Il principio dietro questo manipolo consiste nella combinazione di più energie per raggiungere un obiettivo comune, ottenere risultati tangibili e sorprendere le aspettative da parte dei consumatori. Grazie all'impegno dei laboratori Overline siamo riusciti ad inserire l'Onda battente (ShockWave), la Radio Frequenza multipolare, il Vacuum e l'LLLT (Low Level Laser Treatment). I risultati si possono vedere molto velocemente grazie ai test* interni su un campione ridotto di persone, abbiamo notato una riduzione delle misure generali costante e soprattutto una ridefinizione degli inestetismi principali.

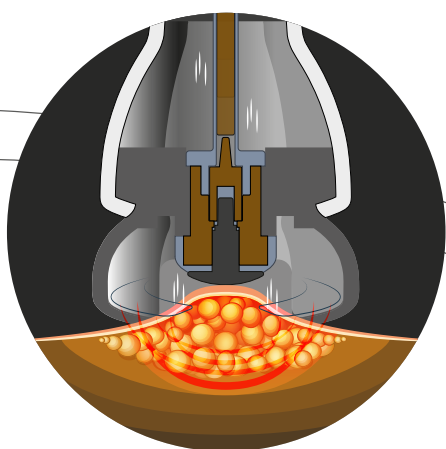


RADIO FREQUENZA MULTIPOLARE

La combinazione con la radiofrequenza stimola le fibre di Collagene, donando flessibilità ed estensibilità alle fibre di supporto. Permette di ottenere risultati fin dalle prime sedute e in una decina di sedute il risultato lascerà tutti sorpresi.

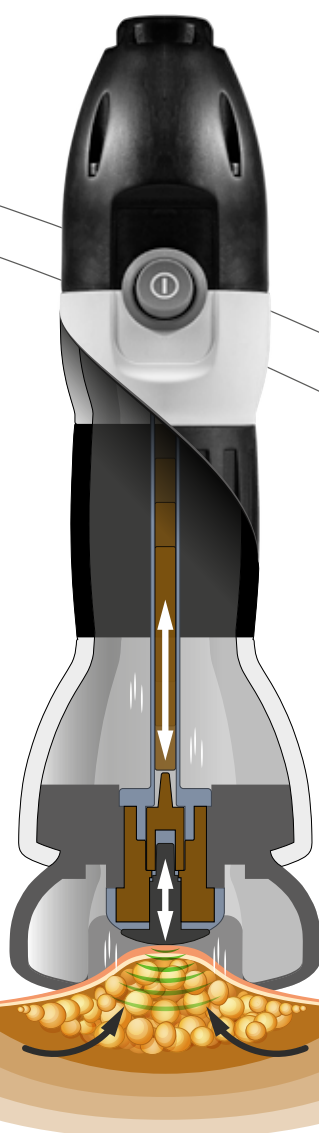

LOW LEVEL LASER TREATMENTS

la tecnologia LLLT, un laser dedicato alla stimolazione dei processi biologici e sollecitare la produzione del gettone energetico che stimola la muscolatura.

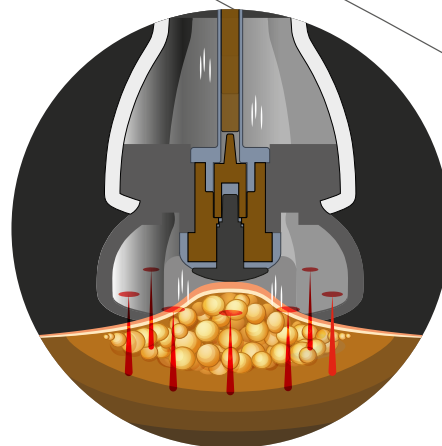

ONDA BATTENTE + VACUUM


L'onda battente in combinazione con il Vacuum agisce a livello localizzato (sulla plica creata grazie al vacuum) eseguendo un'azione specifica di redistribuzione dei tessuti rendendoli lisci e morbidi. La plica ci permette di lavorare in modo attento e preciso, offrendo la possibilità di agire su inestetismi di media-grande intensità oppure piccoli e focalizzati.

* Protocolli e performance eseguiti all'interno dell'Azienda su un campione determinato di persone.

REVOLUTIONARY HANDPIECES SYNERGY ENDO



Sinergia rivoluzionaria specifica per gli inestetismi della cellulite*,
l'adipe e il rilassamento cutaneo.

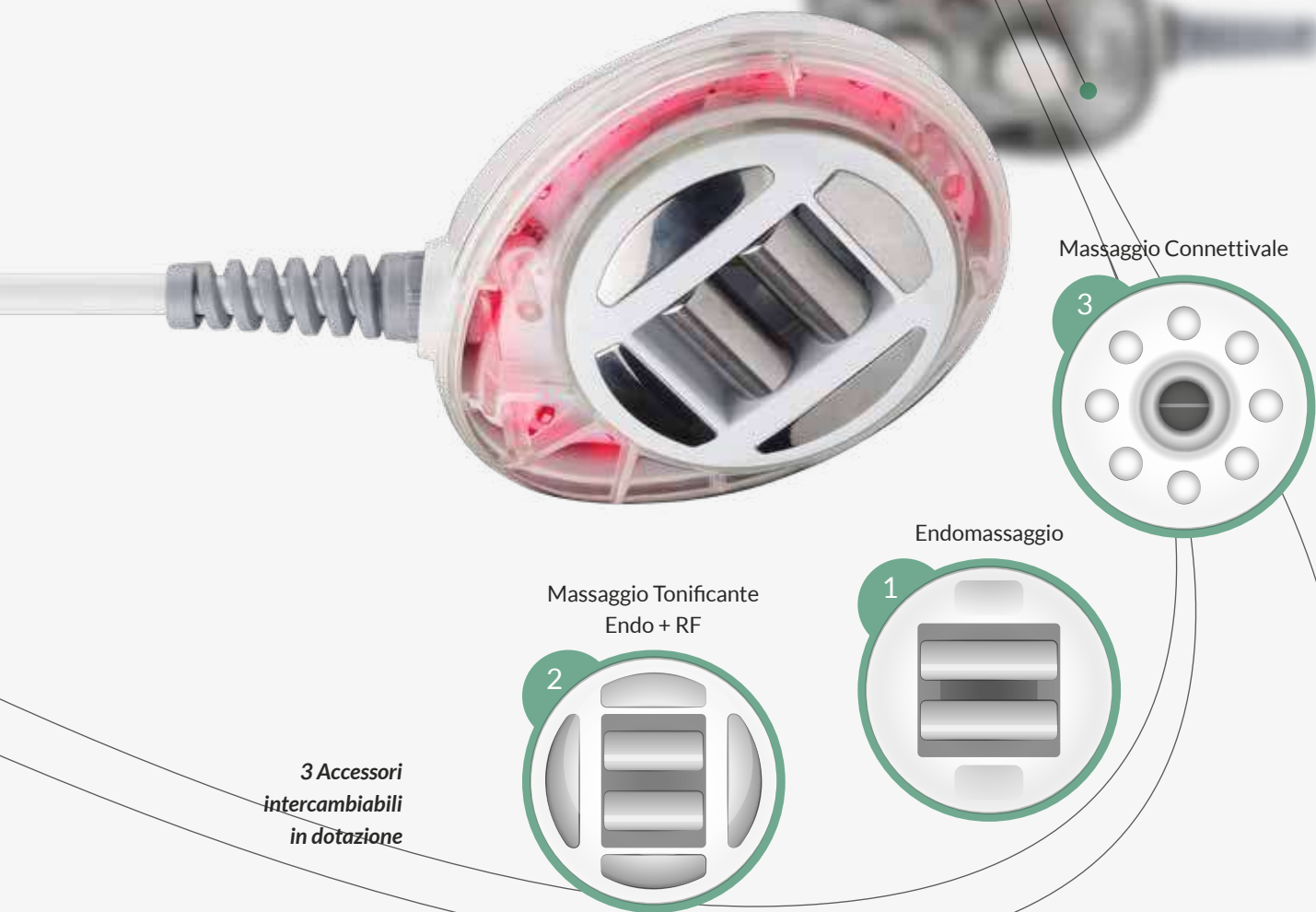


3 Accessori
intercambiabili
in dotazione

I trattamenti corpo saranno più efficaci ed evidenti grazie al **rivoluzionario manipolo multifunzione**. L'ergonomia di questo manipolo, permette all'operatrice di impugnarlo comodamente, senza doversi stancare ma concentrandosi solo sul percorso di bellezza e sugli obiettivi programmati.

Sinergia significa risultati: con la preziosa combinazione di energie differenti, il lavoro sul corpo diventa più mirato e i risultati non tarderanno ad arrivare. Attraverso l'azione della **Radio Frequenza Multipolare** combinata con la tecnologia **LLLT**, che preparano il tessuto e stimolano le fibre a reagire attivamente, gli inestetismi della cellulite, l'adipe e il rilassamento cutaneo risulteranno notevolmente migliorati. A completare il trattamento il supporto dell'**Endomassaggio** per una silhouette che non sarà mai più la stessa. Mentre la **Cromo Frequenza** riamornizzerà la parte con il beneficio della vibrazione dei colori regalando una sensazione di vero e proprio benessere ed esaltando la bellezza.

* inestetismi causati dalla cellulite.

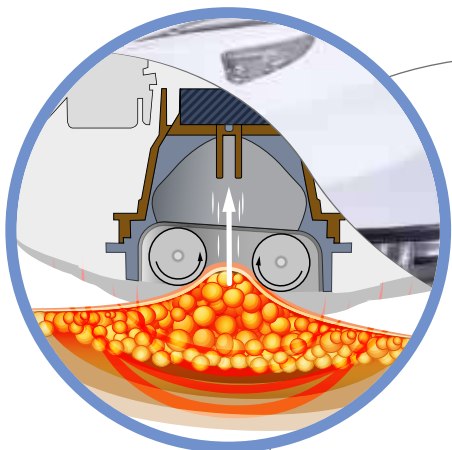

RADIO FREQUENZA

Azione Rigenerante

La Radio Frequenza è una tecnica non invasiva che sfrutta l'effetto delle onde radio, per determinare il rimodellamento dei tessuti, con un'azione particolarmente efficace nel contrastare il rilassamento cutaneo del corpo e anche del viso.



ENDOMASSAGGIO

Azione Drenante

Specifici applicatori permettono di effettuare in simultanea ad altre energie o singolarmente trattamenti di scollamento, drenaggio e massaggio ritmico, questa azione risulta essere indicata per gli inestetismi causati dalla cellulite.

LOW LEVEL LASER TREATMENTS

Azione Stimolante LLLT

Il trattamento Laser a Bassi Livelli (LLLT) utilizza un raggio simile ad una matita a onde elettromagnetiche a singola frequenza e lunghezza d'onda di 980 nm, per promuovere la stimolazione dei tessuti e un efficace effetto sul rimodellamento del corpo.



CROMO FREQUENZA

Azione Riscaldante / Riequilibrante


La Cromo Frequenza considera l'inestetismo una vibrazione disarmonica delle cellule della pelle, che può essere riequilibrata sfruttando l'energia e quindi la lunghezza d'onda di uno o più colori specifici.



REVOLUTIONARY HANDPIECES SYNERGY **ULTRA**



Sinergia rivoluzionaria specifica per gli inestetismi della cellulite*,
l'adipe e rilassamento cutaneo.

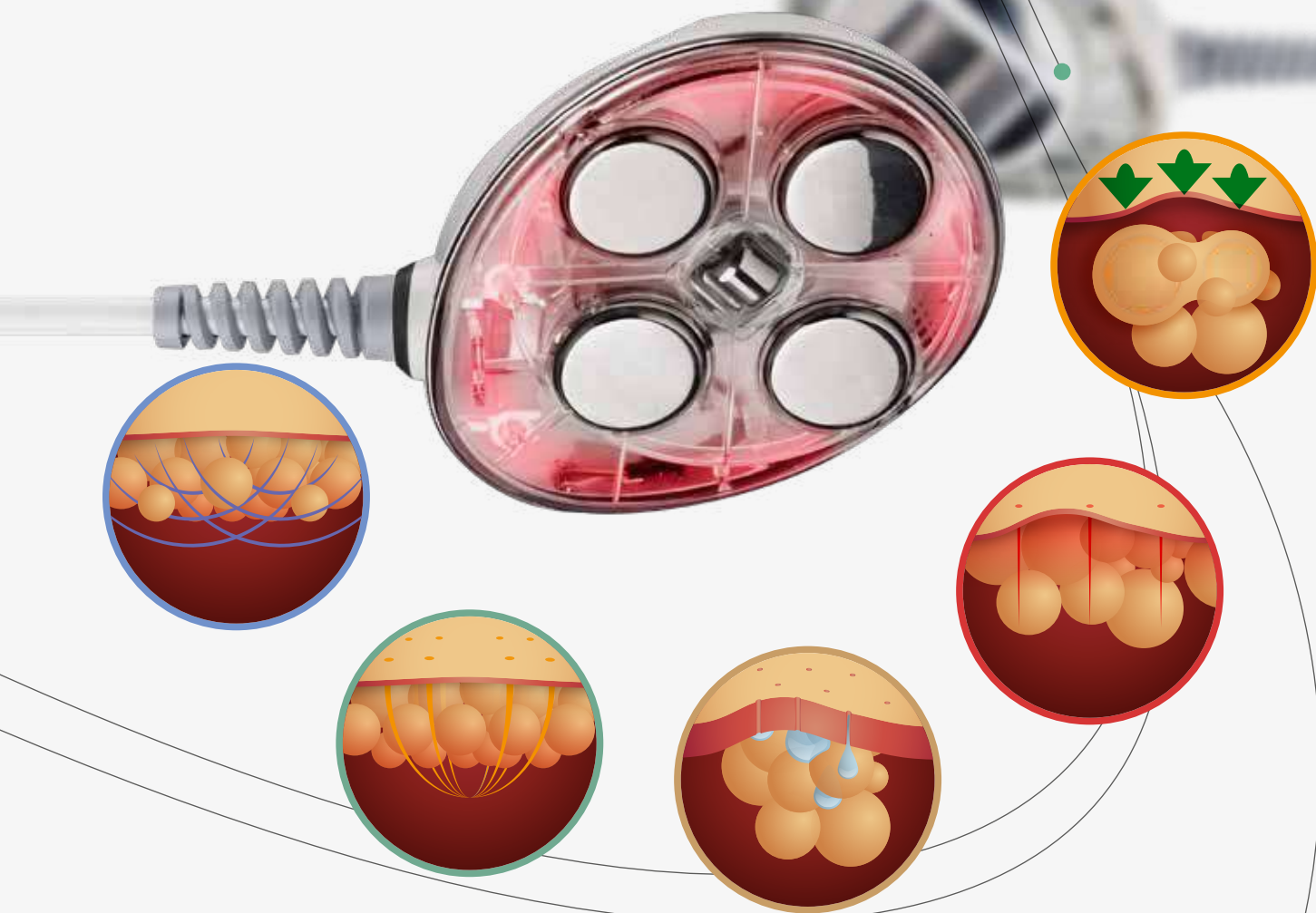

Questo rivoluzionario manipolo si chiama Ultra perché, **grazie alla sinergia di varie azioni specifiche è in grado di migliorare i più comuni inestetismi che attaccano la silhouette del corpo sia femminile che maschile.** L'azione combinata di Ultrasuoni e Elettrolipolisi sarà decisiva nel rimodellamento, in particolare, per quelle zone troppo atone. Il calore della tecnologia LLLT e l'azione della Cromo Frequenza stimoleranno le fibre a rivitalizzarsi. L'Elettroporazione è lo strumento migliore che aiuta a far assorbire preziosi principi attivi nelle zone dove ce n'è maggiore necessità. Una vincente sinergia di tecnologie per contrastare atonia e inestetismi.

* inestetismi causati dalla cellulite.

ULTRASUONI 1MHz

Azione Snellente

Il trattamento ad Ultrasuoni si basa su vibrazioni periodiche di particelle di un mezzo materiale. Vibrazioni che si propagano nel mezzo, con una velocità finita. Ideali nel trattamento contro gli inestetismi causati dalla cellulite e dall'adipe.

ELETTROLIPOLISI

Azione Tonificante

L'obiettivo dell'Elettrolipolisi è quello di attenuare l'inestetismo della cellulite e ridurre i depositi di grasso. Il grasso viene ridotto dalle aree selezionate, senza sforzo o disagio utilizzando correnti elettriche a bassa tensione attraverso piastre cutanee. Si tratta di un trattamento non-invasivo. L'Elettrolipolisi sfrutta l'applicazione di micro-correnti per trattare efficacemente l'inestetismo della cellulite*.

ELETTROPORAZIONE

Azione Intensificante

L'Elettroporazione è un trattamento che favorisce la penetrazione e potenzia la veicolazione dei dermocosmetici, negli strati profondi del derma, permettendogli di agire in un modo diretto e immediato.

CROMO FREQUENZA

Azione Riscaldante / Riequilibrante

La Cromo Frequenza considera l'inestetismo come una vibrazione disarmonica delle cellule della pelle, che può essere riequilibrata sfruttando l'energia e quindi la vibrazione di uno o più colori specifici.

LOW LEVEL LASER TREATMENTS

Azione Stimolante LLLT

Il trattamento LLLT sfrutta un raggio a onde elettromagnetiche a singola frequenza e lunghezza d'onda predefinita, per promuovere la stimolazione dei tessuti e un'efficace effetto sul rimodellamento del corpo.



HANDPIECES

RADIO FREQUENCY

per modellare & definire il Corpo



RADIO FREQUENZA MULTIPOLARE

Azione Rimodellante

La Radio Frequenza Multipolare è una soluzione ideale per combattere i segni dell'invecchiamento. Questa tecnologia ha il vantaggio di focalizzare il raggio di azione in un unico punto attraverso il sistema dei 4 poli. In questo modo si possono ottenere temperature più elevate sia in superficie che negli strati più profondi. Il manipolo multipolare permette inoltre di operare a potenze più basse, e quindi con tempi di trattamento leggermente più lunghi, senza creare fastidi e/o dolori al cliente.

RADIO FREQUENZA BIPOLARE

Azione Elasticizzante

L'effetto della Radio Frequenza si basa sulla trasformazione dell'energia in calore, in effetti molto spesso il percepito non corrisponde con la temperatura in profondità proprio per l'azione endogeno di questa energia. Tra le caratteristiche fondamentali della radiofrequenza la capacità di donare tonificazione ai tessuti grazie al calore che stimola le fibre di collagene a degenerarsi e poi rigenerarsi più forti che mai. Ristabilisce alcune funzioni fisiologiche e soprattutto il trattamento è molto rilassante e senza recupero nel post.



LA RADIO FREQUENZA INTELLIGENTE

MANIPOLI SMART

Manipolo di Radio Frequenza intelligente che aiuta l'operatrice estetica a effettuare il trattamento di Radio Frequenza.

RILEVATORE DI TEMPERATURA

La sua caratteristica principale è quella di rilevare la temperatura della zona trattata, quando la tecnologia viene messa in pausa indicandola sul display del manipolo e garantendo il rispetto delle **normative emanate dal Ministero della Sanità, con il decreto legge n.206 entrato in vigore a Gennaio 2016, relative all'innalzamento delle temperature durante i trattamenti di Radio Frequenza.**

SEGNALATORE LUMINOSO

Grazie all'evoluto software con il quale è stata implementata l'apparecchiatura, il manipolo **SMART** riconosce il trattamento selezionato e si illumina, permettendo di individuare il manipolo da utilizzare.

INDICATORE DEL TEMPO DI ESECUZIONE

L'indicatore del tempo sul display segnala all'operatore i tempi di esecuzione totale dell'energia.

LED INTEGRATI PER IL CROMO BENESSERE

I LED integrati consentono di effettuare in sinergia un trattamento di Cromo Benessere che consiste nell'irradiare le zone del corpo con la vibrazione di differenti luci colorate, per ottenere un vantaggio estetico.





VIDEO EDUCATIONAL

All'interno del percorso guidato troviamo inoltre la possibilità di visualizzare alcuni video che aiutano a chiarire dubbi e migliorare la manualità. All'avanguardia in termini di servizio, **Overline Infinity Total Body Sculpt** si è sempre affiancata all'operatore professionale estetico per offrire un risultato di eccellenza. Certi di questa forza all'interno di **Overline Infinity Total Body Sculpt**, sono stati inseriti alcuni Video Educational, studiati per permettere all'operatore di consultare, in ogni momento, i protocolli operativi corretti. I video di insegnamento relativi ai singoli protocolli e alle specifiche manualità, sono consultabili facilmente grazie al touchscreen 10". **Overline** ha pensato a questa soluzione, per permettere a chiunque, in caso di una piccola dimenticanza, oppure all'inserimento di nuovi operatori, di potere effettuare un'autoformazione al fine di raggiungere le abilità necessarie per offrire e garantire il servizio migliore.



PERFORMANCE PERFETTE

Protocolli e performance effettuati all'interno dell'Azienda* rispettando i metodi di lavoro suggeriti, confermano la sinergia fra la tecnologia **Overline** e i cosmetici **iSol. Beauty** garantendo la massima efficacia del trattamento.


* Protocolli e performance eseguiti all'interno dell'Azienda su un campione determinato di persone.



SOFTWARE INTUITIVO

L'avanzato software di **Overline Infinity Total Body Sculpt**, permette di godere di numerose ed evolute funzioni e di comandare l'apparecchiatura attraverso il monitor 10" in modo semplice, veloce ed intuitivo. Monitor che, per come è concepito, diventa immediatamente uno strumento fondamentale per implementare il lavoro della professionista. Con pochi piccoli gesti, l'operatrice è in grado di effettuare una consulenza a 360° della situazione specifica e fisica del cliente. Può esaminare le immagini, controllare programmi e trattamenti, avere accesso ai dati della propria clientela. Inoltre può verificare la situazione degli step di trattamento da eseguire, fornendo all'estetista la possibilità di motivare e coinvolgere maggiormente il proprio cliente. All'interno del percorso guidato si possono anche guardare alcuni video che aiutano a chiarire dubbi e migliorare la manualità.



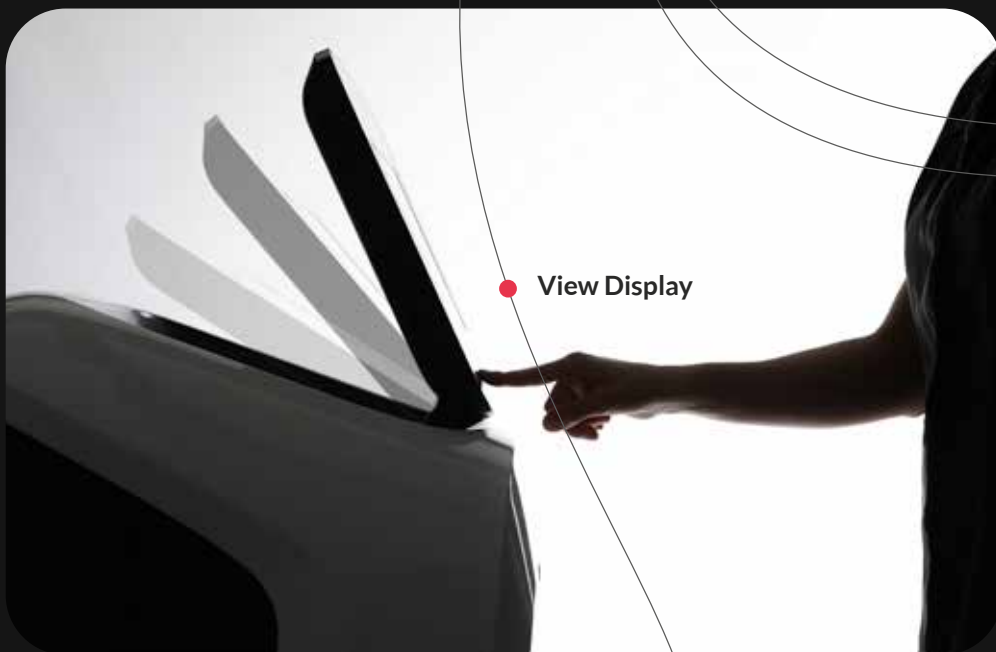

INFINITAMENTE

Bella

Overline Infinity è una scelta di innovazione per l'istituto di bellezza. È la possibilità di infiniti trattamenti personalizzati con la sinergia di tecnologie di ultima generazione. È l'interfaccia intuitiva e la semplicità nell'utilizzo. È l'efficacia dei trattamenti e la soddisfazione del cliente del Centro. È il continuo supporto formativo per consentire ad ogni operatrice di sfruttare al meglio tutte le potenzialità offerte dalle apparecchiature. È la sicurezza di utilizzare sistemi rigorosamente testati, certificati e costruiti rispettando le normative vigenti. È un design dalle linee sinuose, bello da vedere e adattabile a qualsiasi ambiente.

Infinity è per chi ha un obiettivo e non vuole perderlo di vista!

I DETTAGLI

Il Monitor reclinabile elettronicamente di *Overline Infinity* favorisce la facile programmazione e il controllo del lavoro, offrendo una chiara visione del trattamento anche al cliente. Un ampio cassetto superiore e un vano portaoggetti consentono di riporre materiali e cosmetici, mentre il ripiano sagomato sul retro dell'apparecchiatura permette l'ordinato alloggiamento dei manipoli.



Vano porta oggetti



Ampio cassetto superiore



Ripiano sagomato porta manipoli

Il concetto di personalizzazione per *Overline Infinity* è molto importante. Ogni tecnologia dispone dell'avanzato sistema di lettura *Contactless Card*, attraverso il quale per ogni cliente, viene inserita la sequenza del suo trattamento, memorizzando gli step effettuati e quelli da effettuare in modo da ottimizzare i tempi.



Contactless Card





GARANZIA 36 MESI
ZERO
PENSIERI



L'apparecchiatura **Overline Infinity Total Body Sculpt** è garantita da difetti di materiale e manodopera, franco fabbrica, per un periodo di 36 mesi. Per attivare le condizioni di validità della garanzia è molto semplice, basta compilare in tutte le sue parti il modulo di Garanzia che si trova all'interno della confezione di **Infinity Total Body Sculpt**, e inviarlo a **Overline** entro e non oltre 10 giorni dalla data di acquisto.



COSMETICA INTEGRATA

L'accoppiata *Overline Infinity Total Body Sculpt* e cosmetica integrata **iSol. Beauty**, è sinonimo di risposte concrete a tutte le esigenze estetiche e di risultati mirati. I cosmetici **iSol. Beauty** sono studiati ad hoc per lavorare in modo efficiente con le tecnologie di cui è dotata l'apparecchiatura, per la massima soddisfazione dell'operatrice e un'eccellente beauty experience del cliente.




- 1 Detersione
CLEANSING SOFT MOUSSE
ISO.FOAM.150
[150ml]
Detergente
Dermocompatibile
Viso & Corpo
- 2 Detersione
JOJOBA FACE & BODY SCRUB
Scrub Gel ai Microgranuli di Jojoba
ISO.SCRUB.200
[250ml]
- 3 Trattamento corpo
RF BODY EMULSION
Emulsione Corpo per RF
ISO.RF.500
[500ml]
- 4 Trattamento corpo
ULTRASOUND BODY GEL
Gel Innovativo a base di Fosfatidilcolina
ISO.GEL.110 [500ml]
- 5 Endomassage & synergy
OILGEL SYNERGY
ISO.RFOIL.100
[500ml]
RF & Massage
- 6 Trattamento corpo
RESOLUTION BODY CELL
Siero a Cristalli Liquidi Cellulite per Elettroporatore Corpo
ISO.POR.500 [250ml]
- 7 Trattamento corpo
RESOLUTION BODY TONE
Siero a Cristalli Liquidi Tonificante per Elettroporatore
ISO.POR.550 [250ml]
- 8 Trattamento corpo
HYDRABODY CELL
Emulsione Corpo Cellulite
ISO.BODY.100
[200ml]
- 9 Trattamento corpo
HYDRABODY FIT
Emulsione Corpo Effetto Tonificante
ISO.BODY.200
[200ml]
- 10 Trattamento Viso
RF FRAZIONATA ACTIVATOR
ISO.RFF.120R
[10 Strip da 3ml]
Siero Anti-Age Post RF Frazionata
- 11 Trattamento Viso
RF & STIM FACE EMULSION
ISO.RF.100
[250ml]
Emulsione Corpo per RF e Stimol
- 12 Trattamento Viso
RFF EXTREME
ISO.RFF.110
[Airless 150ml]
Emulsione Anti-Age Pre RF Frazionata

Da sempre al servizio delle operatrici estetiche

Avanguardia ed Innovazione sono le terminologie ideali per identificare **Overline**. Una storica azienda milanese, leader indiscussa nella produzione e commercializzazione di apparecchiature hi-tech per l'estetica professionale.

Nasce nel 1989 e, da allora, la si può descrivere semplicemente "una storia di successo". Una realtà che esprime il proprio stile aziendale attraverso un impegno etico e una gestione commerciale attenta e responsabile.

Le terminologie adottate nei materiali informativi aziendali, per definire tecnologie e caratteristiche, sono quelle permesse a livello internazionale e comunemente utilizzate

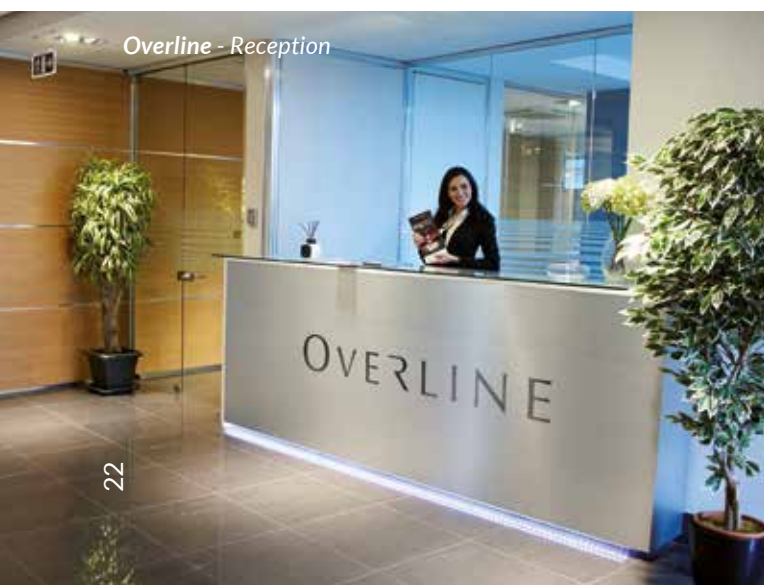

Overline - Reception



Overline - Corso di formazione

Ricerca & Sviluppo

Cuore pulsante dell'azienda, l'innovativo laboratorio di Ricerca e Sviluppo è il luogo dove Tecnologie dalle elevate prestazioni e dal semplice utilizzo, forniscono risposte efficaci alle esigenze degli operatori professionali dell'estetica. Sistemi differenti, più sicuri e dalle molteplici funzionalità per il viso, il corpo e l'epilazione

Made in Italy

Una produzione al 100% Made in Italy, che offre vantaggi competitivi in termini di prestazioni, sicurezza e servizio al cliente. Le tecnologie Overline sono distribuite presso i migliori centri estetici e istituti di bellezza su tutto il territorio italiano e in tutti i paesi europei oltre che in Sud America, Messico, Africa e Asia.

Certificazioni

Overline è un marchio **Technology S.r.l.**, un'azienda che si impegna costantemente nella ricerca e nello sviluppo di tecnologie, per offrire al mercato dell'estetica professionale, innovativi sistemi che offrono risultati visibili ma allo stesso tempo rispettano la massima sicurezza dell'operatore e del cliente. Oggi **Technology**, forte della sua grande esperienza, ha ottenuto delle importanti certificazioni che attestano il pieno rispetto delle normative e degli standard internazionali nella produzione di apparecchiature biomedicali, elettroestetica e cosmetica. Le certificazioni che rendono tutte le tecnologie di altissimo livello sono le seguenti:



Tüv Rheinland ISO 9001:2015. Rappresenta la certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità, riconosciuta a livello internazionale, garantisce che le apparecchiature rispettino il sistema di gestione previsto dalla norma per la progettazione, la produzione, la vendita, lo sviluppo e la ricerca.

Tüv Rheinland ISO 13485:2016. La certificazione relativa al Sistema di Gestione Qualità per Dispositivi Medici, è uno standard di riferimento di Qualità nell'ambito delle procedure regolamentari che disciplinano la progettazione, la produzione e l'immissione in commercio dei Dispositivi medici.

Tüv Rheinland ISO 45001:2018. Relativa allo standard per la gestione della salute e sicurezza dei lavoratori.

www.tuv.com ID 9105082302




OVERLINE

ITALIA



Infinity

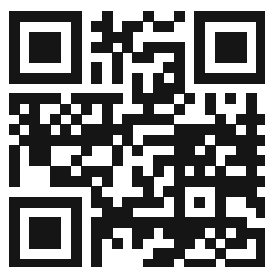

CHIAMA IL +39 02 539 1328

www.infinity.overline.it



*Overline si riserva il diritto di apportare modifiche alle apparecchiature descritte, in qualsiasi momento e senza preavviso.
Le apparecchiature Overline sono progettate e programmate per ottenere risultati sugli inestetismi senza passare il limite estetico consentito.*



Overline Infinity è un marchio Technology S.r.l.